
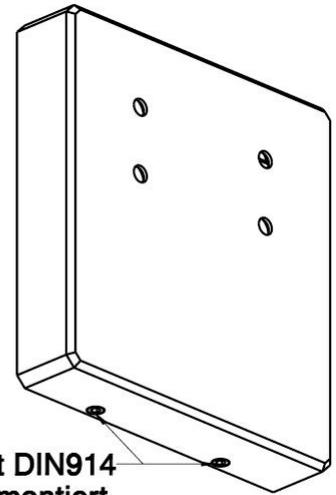
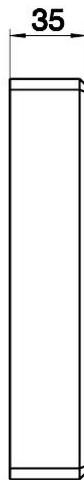


# Montageanleitung




Adapterplatte DKS

(SN 54293..)

**ERLAU**<sup>®</sup>  
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

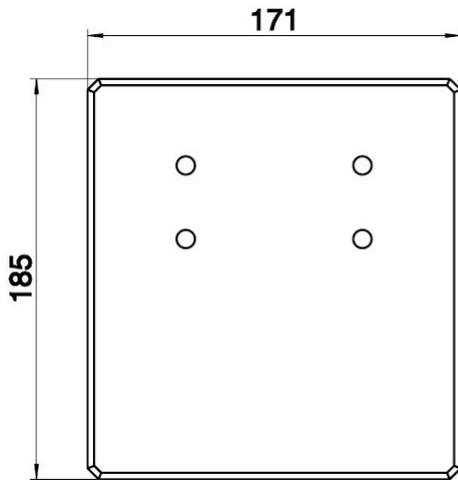

Gewindesttift DIN914  
M8x20 A2 vormontiert.  
Zum Einbau lösen!

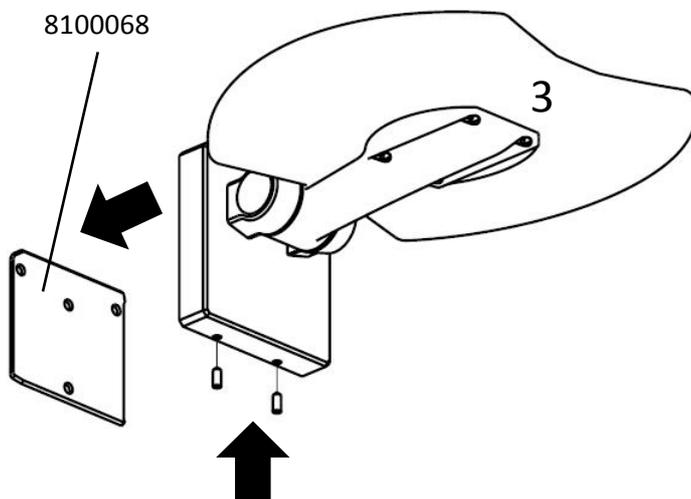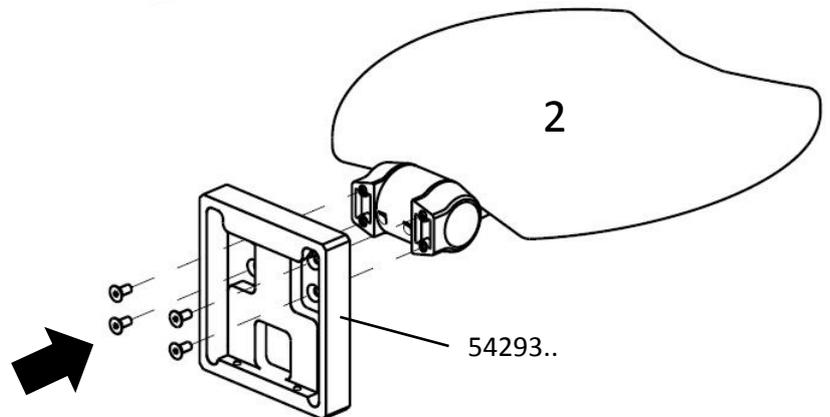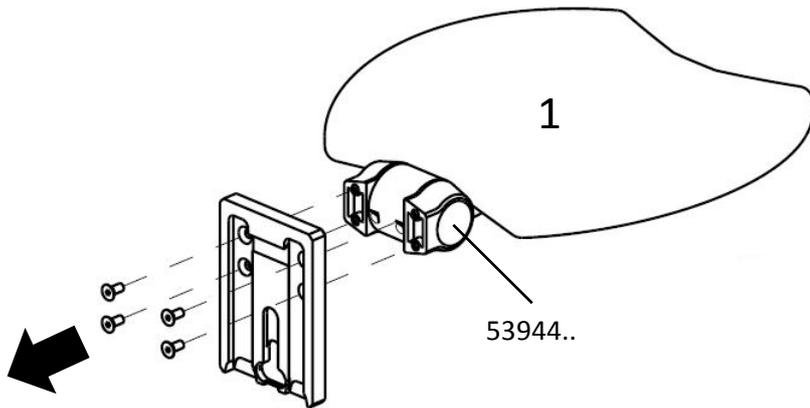



## Warnhinweise

### Anwendung:

Verwenden Sie die Erlau Adapterplatte (54293..) nur in ihrer vorgesehenen Funktion zur Befestigung eines Duschklassensitzes DKX (53944..) auf der Anschraubplatte APK (8100068). Zweckentfremdungen wie z.B. die Verwendung als Adapterplatte oder Wandplatte bei anderen als den oben genannten Produkten können zu Unfällen führen, die schwere Verletzungen zur Folge haben können.

Die Gewährleistung für Schäden die aus nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen ist ausgeschlossen.

### Installation:

Die Montage der Adapterplatte (54293..) erfolgt nachträglich bei Objekten, die in der Vergangenheit mit der Anschraubplatte APK (8100068) vorgerüstet wurden. Hierzu muss die Wandplatte des Duschklassensitzes DKX (53944..) zuerst demontiert werden. Achten Sie beim der Montage darauf die 4 Schrauben und Gewinde nicht zu beschädigen und ziehen Sie die Schrauben fest an. Beschädigte Schrauben und Gewinde sowie nicht fest angezogene Schrauben können zu Unfällen führen, die schwere Verletzungen zur Folge haben können. Die Montage durch Fachpersonal (Sanitärinstallateur) wird dringend empfohlen.

Die Haftung für Schäden, die aus unsachgemäßer Montage entstehen ist ausgeschlossen.



## Pflegehinweise

Erlau Produkte verwenden im wesentlichen folgende Oberflächenmaterialien:

- Pulverlacke
- Chrom-Nickel
- Eloxiertes Aluminium
- Kunststoffe

Verwenden sie zur Reinigung der Oberflächen ein sauberes feuchtes Tuch aus Viskose oder Mischgewebe. Sollten Sie auf den Einsatz von Reinigungsmitteln nicht verzichten wollen, so verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel mit einem PH Wert zwischen 5 und 9. Geeignete Reinigungsmittel verwenden Wirkstoffe wie Phosphate, Seifen oder Tenside. Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis können ebenfalls verwendet werden. Testen Sie im Zweifelsfall das Reinigungsmittel an einer unauffälligen Stelle. Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel die z.B. Salzsäure, Essigsäure oder Ameisensäure enthalten. Verwenden Sie keine laugenhaltigen Reinigungsmittel wie Fußbodenreiniger, Industriereiniger oder Reiniger die Natriumhydroxid enthalten. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Aceton, Nitroverdünnung oder Waschbenzin. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Scheuerbürsten. Ältere Mikrofasertücher können durch anhaftenden Schmutz und Reinigungsmittelrückstände Kratzer verursachen und sind daher nur bedingt zu empfehlen. Entfernen Sie anhaftende Rückstände von Reinigungsmitteln oder Körperpflegeprodukten frühzeitig. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittelherstellers. Geeignete Reinigungsmittel und Informationen zu deren Anwendung erhalten Sie von Reinigungsmittelherstellern wie z.B. der Firma Buzil ([www.buzil.com](http://www.buzil.com) / Hotline: +49 (0) 8331 930-730). An bereits beschädigten Oberflächen, kann es durch Einwirkung jeglicher Art von Reinigungsmitteln zu einer Erweiterung des Schadens kommen.

Eine Gewährleistung für Schäden die aus unsachgemäßer Reinigung hervorgegangen sind ist ausgeschlossen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich an die RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG

Tel. + 49 (0) 7361 504-0.



## Pflegehinweise

Für die Entsorgung von Produkt und Verpackung sind die jeweiligen regionalen und nationalen Vorschriften zu beachten.